



Стелька.рф



Изготовление стелек



Стелка.рф

Диагностика



Стелка.рф

Ставим клиента на платформу и ровняем стопы по размерному ряду. Клиент должен стоять «как обычно».

Анализ проходит в течение 15-30 секунд.





Результат оценки



№ 0024102023 | 89200228668 | мужской

30 | 90 | 44

2023-10-24 16:01:15

Типы свода стопы


ЛЕВАЯ СТОПА | ПРАВАЯ СТОПА

Плоская стопа | Низкий свод | Нормальный | Высокий свод

Типы формы стопы

ЛЕВАЯ СТОПА | ПРАВАЯ СТОПА

Тяжелая гиперпронация | Гиперпронация | Нормальный | Заниженное давление

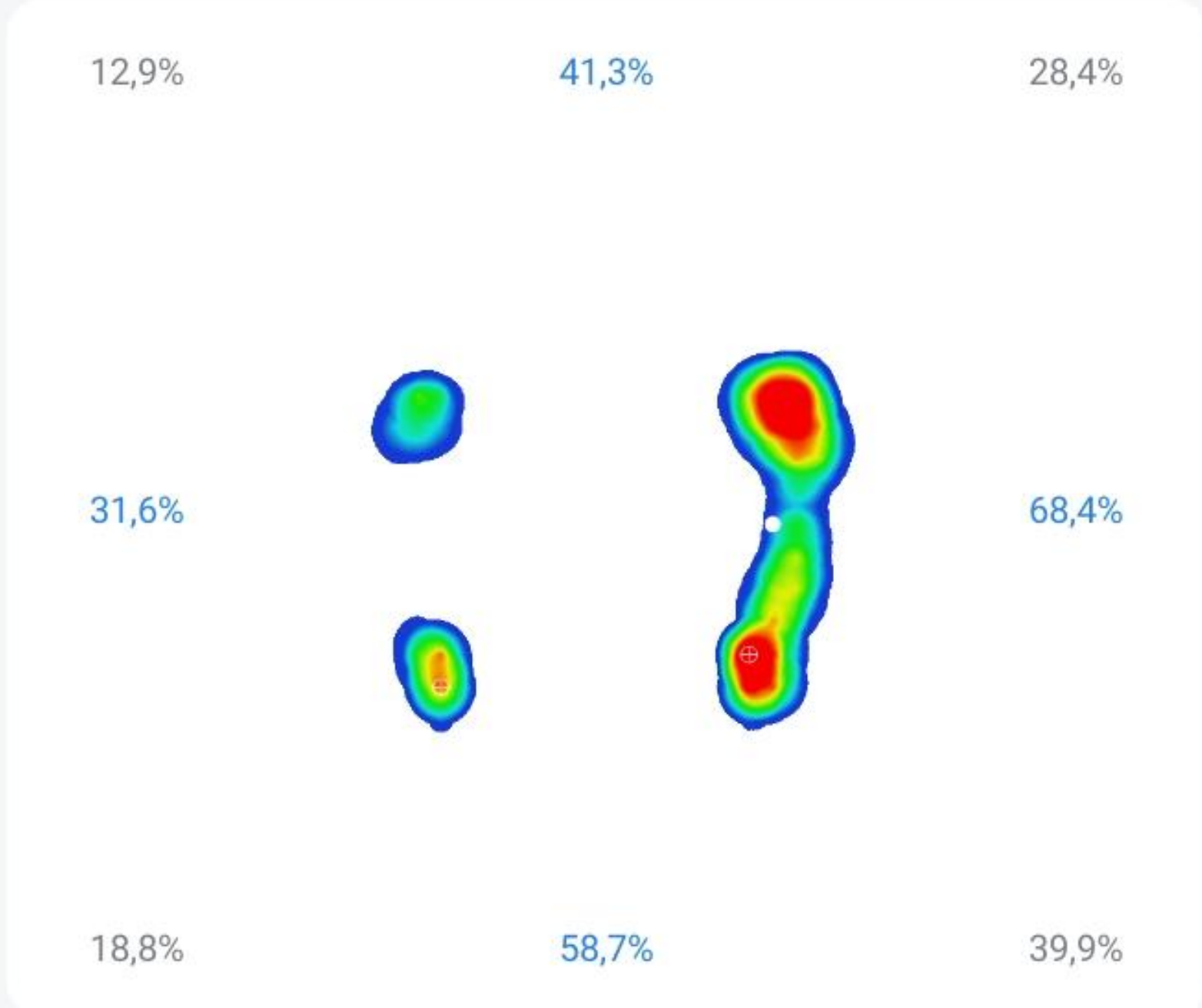

Результат оценки

Передняя нога	Левая стопа: 12,9%	Правая стопа: 28,4%
Задняя нога	Левая стопа: 18,8%	Правая стопа: 39,9%
Пик давления	Левая стопа: 0.61	Правая стопа: 3.27
Пик давления	Левая стопа: Сзади	Правая стопа: Сзади

Рекомендуется подушка

Стиль N2

Хорошая поддержка
Встроенная полная U-образная подушка
Обеспечивают хорошую поддержку при поглощении ударов



Стелка.рф

- Данные клиента
- Наличие продольного плоскостопия
- Наличие гипер-/гипопронации стопы

№ 0024102023 89200228668 мужской

30 90 44

2023-10-24 16:01:15

Типы свода стопы

ЛЕВАЯ СТОПА ПРАВАЯ СТОПА

Плоская стопа	Низкий свод	Нормальный	Высокий свод

Типы формы стопы

ЛЕВАЯ СТОПА ПРАВАЯ СТОПА

Тяжелая гиперпронация	Гиперпронация	Нормальный	Заниженное давление

- Распределение веса клиента относительно стоп
- Возможные риски для здоровья при отсутствии коррекции стойки и походки клиента



- Текстовая оценка распределения веса клиента относительно стоп
- Рекомендованный тип стелек

Результат оценки


Передняя нога Левая стопа : 12,9% Правая стопа : 28,4%

Задняя нога Левая стопа : 18,8% Правая стопа : 39,9%

Пик давления Левая стопа : 0.61 Правая стопа : 3.27

Пик давления Левая стопа : Сзади Правая стопа : Сзади

Рекомендуется подушка

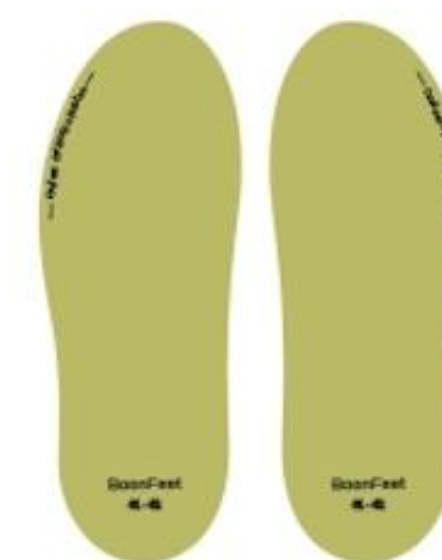

Стиль N2

Хорошая поддержка
Встроенная полная
U-образная подушка
Обеспечивают хорошую
поддержку при поглощении
ударов



Стелка.рф

Состав стелек

1 слой: дышащий антибактериальный слой. Поможет избавиться от проблемы запотевания и запаха ног.

2 слой: буферный слой с превосходными функциональными и амортизирующими свойствами. Он добавляет комфорта в движении и снимает усталость ног.

3 слой: корректирующий и поддерживающий из запатентованного полимерного материала. Позволяет корректировать стопу, минимизировать риск травм и возникновения болей в суставах и мышцах, снимает усталость ног и облегчает движение.

4 слой: высокопрочный, износостойкий слой, изготовленный из высококачественных противоскользящих материалов.



Стелка.рф

Типы стелек





Стелька.рф

Стелька N1 синего цвета.

Имеет самую сильную поддержку свода стопы. Подходит для людей с плоскостопием II и III степени, вальгусной деформацией стопы, а также для людей весом более 90 кг.

Также данная модель используется для активностей с низким ударным воздействием: ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде и др. Усиленная U-образная пластина не позволит стельки быстро деформироваться в процессе использования.





Стелька.рф

Стелька N2 желтого цвета.

Данная модель имеет хорошую стабилизацию, а двухслойный смещенный край встроеной пластины обеспечивает лучшую поддержку при сохранении амортизации.

Подходит для людей с плоскостопием и вальгусной деформацией от легкой до умеренной степени. Стельку N2 можно использовать для повседневного бега, а также для видов спорта со специализированным воздействием, таких как волейбол, баскетбол, теннис и катание на лыжах.






Стелька.рф

Стелька N3 черного цвета.

Модель N3 имеет удобную поддержку свода, общая толщина стельки составляет всего 2 мм, она тонкая и легкая. Внешний слой изготовлен из высококачественной замши, мягкой, тонкой и вощенной. Данная стелька учитывает подвижность стопы, помогает мышцам улучшить свою эластичность и поддерживает свод, при этом сохраняя эффективную амортизацию.

Подходит для людей с легкими аномалиями свода стопы для повседневных, деловых и спортивных задач, в том числе ношение деловой обуви. Также используется при в качестве профилактики плоскостопия и других заболеваний стопы.

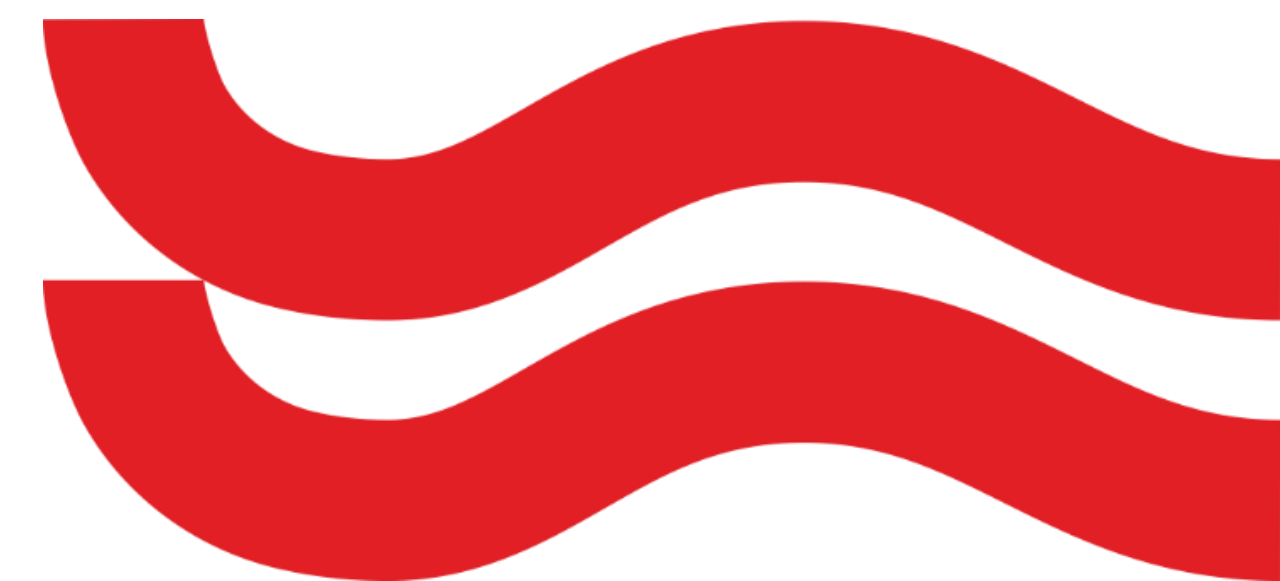



Стелька.рф

Стелька N4 красного цвета.

Данная модель имеет умеренную поддержку и превосходную амортизацию. Подходит для людей с поллой стопой, а также для людей с высокими требованиями к амортизации.

Отличный вариант, как для повседневного использования, так и для беговой спортивной обуви или обуви с узкой колодкой, такой как футбольные бутсы, коньки, велотуфли и прочие.





Стелька.рф

Стелька N5 бежевого цвета.

Верхний слой стельки N5 мягкий, удобный и эластичный, что обеспечивает комфорт при ношении, при этом давая необходимую поддержку свода. Эти свойства помогут уменьшить нагрузку на суставы нижних конечностей, облегчить боль, вызванную мышечной усталостью и язвами стоп.

Подходит при гипостезии нижних конечностей у диабетиков, людей с чувствительными стопами, людей с избыточным весом, а также людей среднего и пожилого возраста с атеросклерозом сосудов и невропатией нижних конечностей.





Стелька.рф

Изготовление стелек



Стелька.рф

Подбор нужного размера

- Оставьте сзади пространство примерно в 1 см для хорошей посадки пятки
- Оставьте около 1 см спереди для достаточного места пальцев ног





Стелька.ру

Балансировочная пластина должна находиться ниже подушечки стопы, чтобы обеспечить нормальную работу стопы.

Если вам нужно выбрать размер больше, чем указано в размере / длине стопы (например, клиент носит большую обувь / передняя часть стопы широкая), убедитесь, что балансировочная пластина не попадает под подушечку стопы.





Стелька.рф

Разогревание стелек в течение 6-8 минут

Вставьте стельки в верхнюю прорезь обогревателя, пяткой вперед.

Балансировочная пластина должна полностью входить в нагреватель.

Оставьте стельки на расстоянии около 3 см, чтобы их было легко вынуть из нагревателя после того, как стельки нагреются.






Стелка.рф

Нагревание стелек происходит при температуре не менее 110 градусов.






Стелка.ру

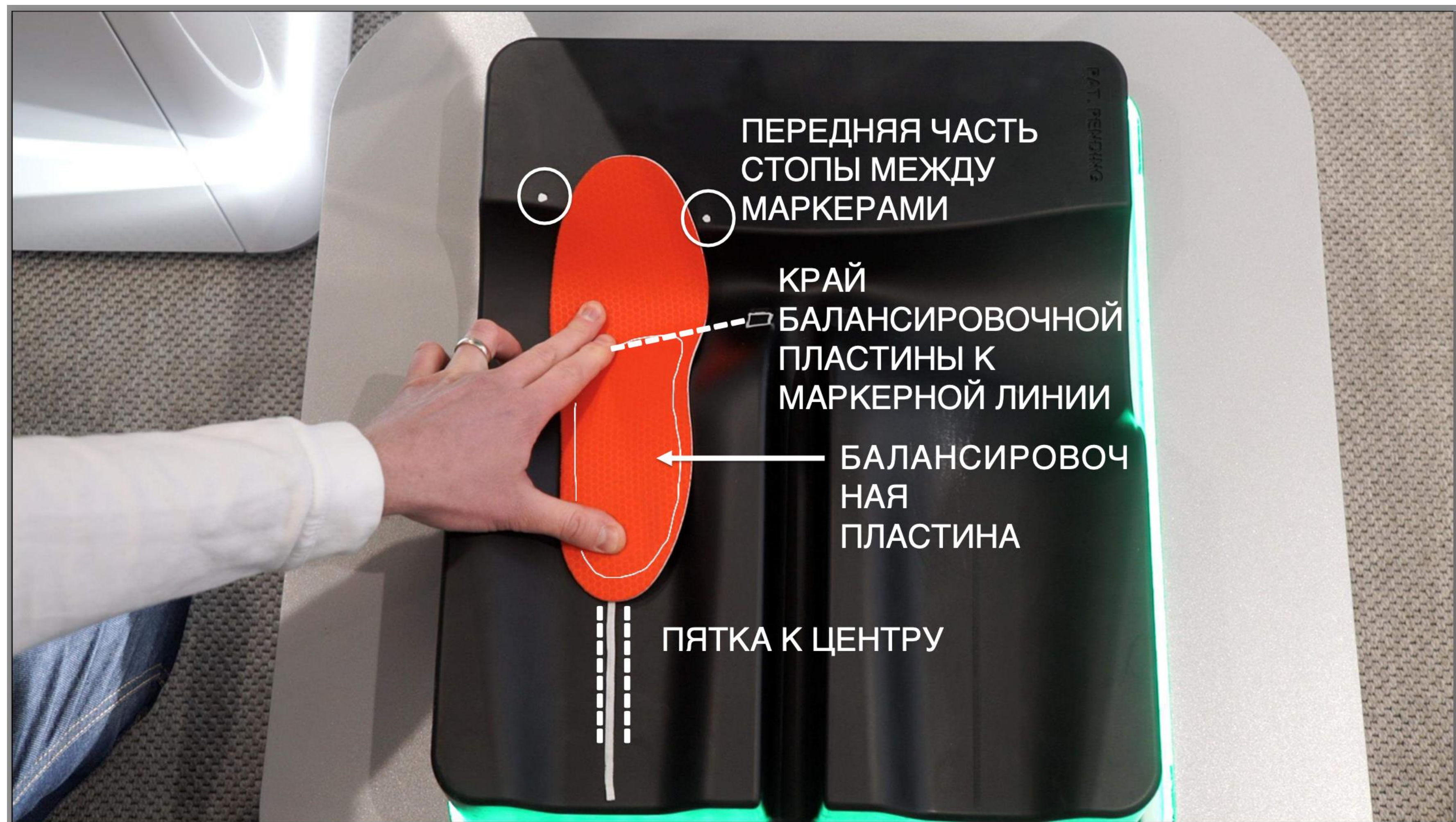

После нагревания стелек, их нужно правильно положить на форму, имитирующую «мокрый песок».

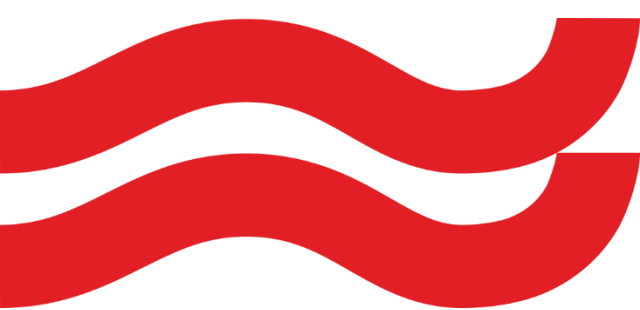




Стелька.руф



Центральная линия для пяточной чашечки
Область для переднего края –
горизонтальная линия




Выровняйте чашечку пятки по центральной
линии
Совместите балансирующую пластину с
показанной областью
Выровняйте переднюю часть стелек

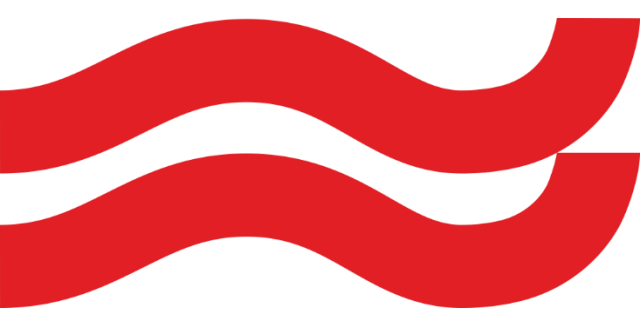




Стелька.рф

Проинформируйте клиента о процессе формования. Попросите клиента встать ногами по обе стороны от подушечки. Затем поочередно попросите его поставить ноги на стельки.

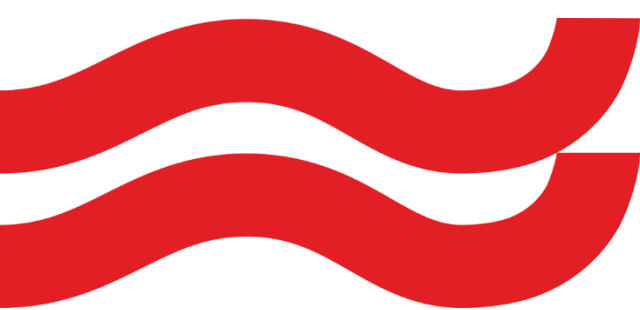




Стелька.рф

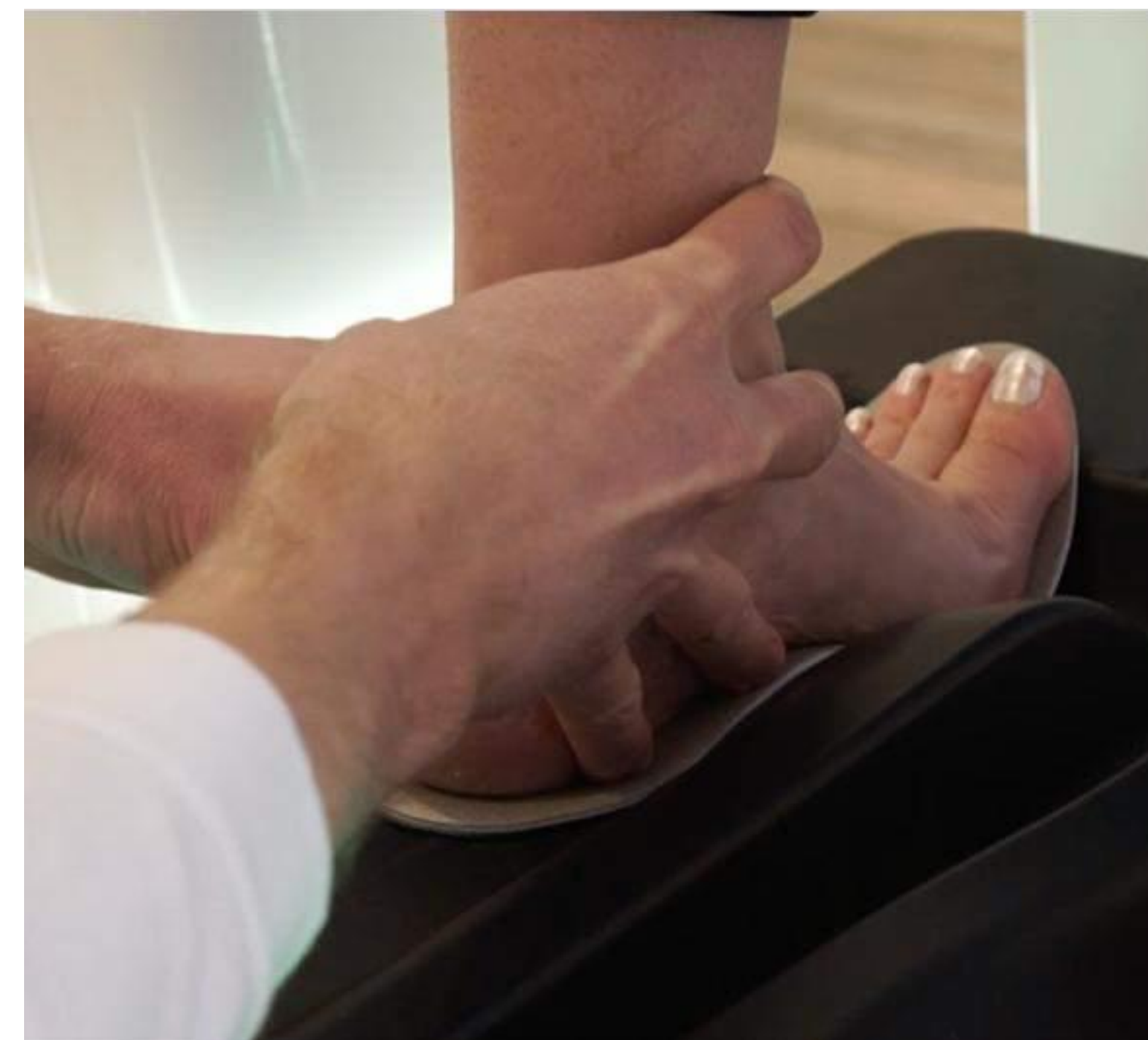


**Выровните стопы, используя
вращение/коррекцию
голеностопного сустава.**

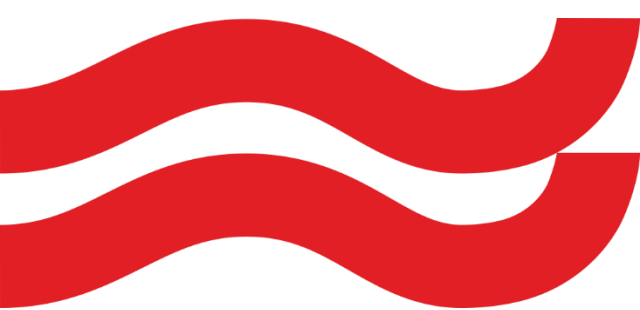



Стелька.рф

- Распределение веса: 50% левая и 50% правая нога
- 50% на пятке и 50% на передней части стопы

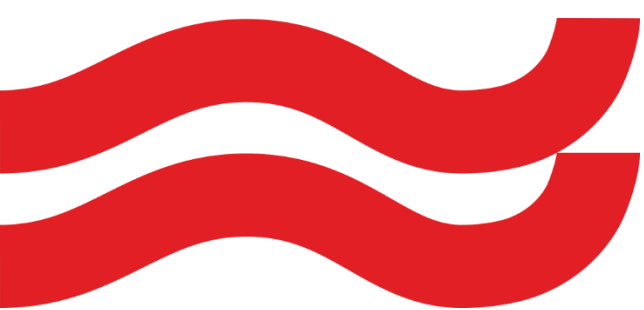



Стелка.рф





Стелка.рф





Стелька.руф







Стелка.рф





Стелька.рф

Пока стелька полностью не остыла, чашечку для пятки можно скорректировать вручную.

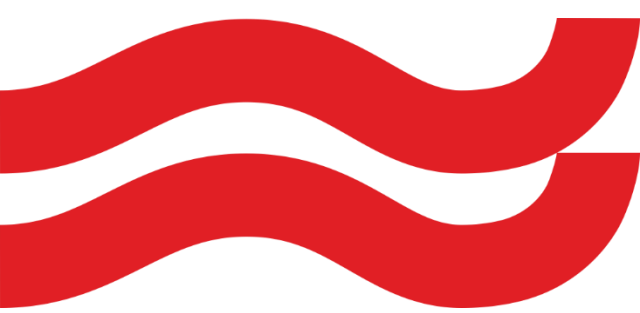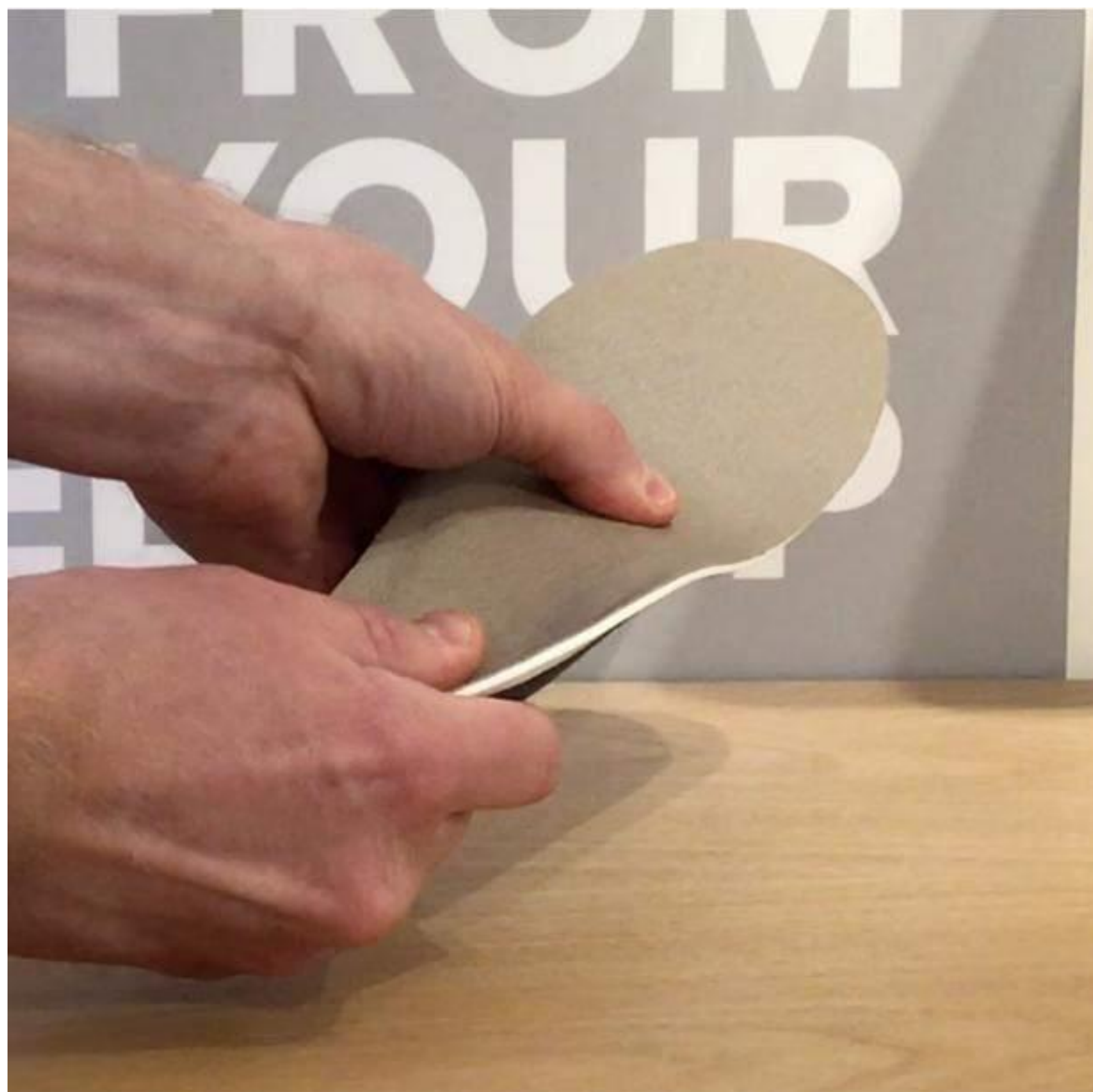



Стелька.рф

Стелька остывает в течение 5 минут.
Затем ее можно вставить в обувь.

